

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI HORMON PROGRAMI NUMUNE SAKLAMA ve ÇALIŞMA TALİMATI

1- Kullanım Amacı:

LabPT Hormon Kalite Kontrol Programının amacı, test sonuçlarınızın tarafsız ve uluslararası istatistiksel analiz standartlarına en uygun şekilde işlenerek, kullandığınız yöntem ve cihaz marka/modeline göre karşılaştırabileceğiniz konsensüs değer ve standart sapmayı hesaplayarak, bu değerler üzerinden laboratuvarınızın performansının en doğru bir şekilde belirlenmesini sağlamaktır.

Hormon programına özel olarak **CLSI C37A kılavuzuna göre taze insan serum havuzlarından** hazırlanan ve porsiyonlanan iki farklı seviye numune ile yöntem ve cihaz marka/modelinizin her iki seviye sonuçlarının bir arada görsel olarak sunulması ve laboratuvar biasının hızla değerlendirilebilmesine yardımcı olması amaçlanır.

1- Numune Türü, Miktarı, Saklama Koşulları ve Stabilitesi:

Hormon testleri için **taze insan serum havuzlarından** elde edilen iki farklı seviyede 2,5'şer mL olmak üzere her programda toplam 2 adet serum numunesi gönderilir. Numuneler laboratuvara ulaştıktan sonra buzdolabında (2-8°C'de) dondurmadan muhafaza edilmelidir. Stabilite Süresi, çalışma takviminde "Önerilen Çalışma Tarih Aralığı" olarak belirtilmiştir. Numunelerin stabilite ve homojenite çalışmaları yapılmıştır.

2- Cihaz ve Yöntem Seçimi:

Sonuçların değerlendirilmesi ve laboratuvarların gruplanması açısından büyük önem taşıdığından, özellikle cihaz marka/model, yöntem, kit ve referans aralık tanımlamaları yapılmalıdır. Ayrıca programın web sitesinden, daha önce girilmiş olan her türlü bilgi **sonuç girişleri öncesinde** gözden geçirilmeli ve meydana gelen değişiklikler güncel olarak işlenmelidir. Test metodları bu dokümanın 4/4 sayfasında verilmiştir.

Program kapsamında elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması sırasında yararlı olabileceği düşünüldüğünden, katılımcı laboratuvarların analiz sonuçlarıyla birlikte, raporlarında kullandıkları referans aralıkları da belirtmeleri istenmektedir. Referans aralıklar **40 yaşındaki erkekler** için verilmektedir.

3- Testlerin Çalışılması:

Çalışma öncesinde numuneler 30 dakika oda sıcaklığında bekletilmeli ve çalkalamadan, köpürtmeden, nazıkçe alt-üst edilerek tamamen homojen hale gelmesini sağlanmalıdır. Homojen hale gelen numuneler, 4000 rpm'de 5 dakika santrifüj edildikten sonra çalışmaya alınmalıdır.

Kalite kontrol programından arzu edilen yararların temin edilebilmesi için, numuneler laboratuvara gelen herhangi bir hasta numunesi gibi çalışılmalı, analitik işlemler açısından hiçbir farklılık yapılmamalıdır.

4- Güvenlik Önlemleri ve Uyarılar:

Yöntemler arasındaki farkı en aza indirmek ve olası dilüsyon hatalarını engellemek amacıyla numuneler liyofilizasyon işlemine tabi tutulmamıştır. Numuneler gönderim öncesi enfeksiyöz viral etkenler yönünden serolojik incelemeye tabi tutulmuş olsalar da biyolojik kökenli bütün numuneler gibi, bu numunelerin de tüm enfeksiyon etkenleri açısından risk taşıdığı dikkate alınarak, gereken titizlik gösterilmelidir. Çalışma süresi dolan numuneler, "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında bertaraf edilmelidir.

5- Sonuçların Gönderilmesi:

Program kapsamındaki testler ve birimleri içeren sonuç listesi 2. sayfada yer almaktadır. Sonuçların listede verilen birimler esas alınarak sisteme girilmesi gerekmektedir.

Veri girişleri www.labpt.com.tr adresinden katılımcıya ait Laboratuvar kodu, kullanıcı adı ve şifre ile "Sonuç Girişi" alanından, ilgili program adı ve test adı seçilerek yapılır.

Not: Son sonuç girişi tarihinden itibaren sisteme sonuç girişi yapılamayacaktır. Son giriş tarihine kadar sonuçlarınızı revize edebilirsiniz. Girilen sonuçların PDF çıktısını alabilirsiniz. Program takvimi bu dokümanın 3/4 sayfasında verilmiştir.

6- Dönem Sonu Değerlendirmesi:

Labpt Kalite Kontrol Programlarında katılımcı performans değerlendirilmesi programın düzenlendiği ayın son haftası içinde yapılmaktadır. Değerlendirme raporları, takip eden ayın 3. günü online olarak yayınlanır. Raporlara, www.labpt.com.tr adresinden laboratuvar kodu, kullanıcı adı ve şifre kullanarak erişilir. Dönem sonu değerlendirme raporları sistemden pdf formatında alınabilmektedir. Raporların değerlendirilmesinde kılavuz olarak Bireysel Performans Değerlendirme Raporu – Açıklamalı Anlatım dokümanından bilgi alınabilmektedir.

7- Gizlilik:

Labpt Kalite Kontrol programı, katılımcılara ait bilgilerin gizliliğine büyük önem vermektedir. Katılımcı laboratuvarlar kayıt esnasında oluşturulan ve sadece kendilerinin ve program organizasyonunda görevli personelin bildiği bir Laboratuvar Kodu ile tanımlanır. Katılımcılar, veri-sonuç girişi ve rapor görüntüleme için üyelik aktivasyonu sonrası kendilerine mail ile gönderilen laboratuvar kodu ve kendisi tarafından değiştirilebilen kullanıcı adı ve şifre bilgilerini kullanır. Bu bilgiler sadece kayıt sırasında katılımcı tarafından belirlenen kurum temsilcisine ait mail adresine gönderilir. Kullanıcı adı ve şifre gibi kurum temsilcisine ait bilgiler, bilgi güvenliğinin sağlanması amacı ile telefonla ve kayıt sırasında verilen e-mail adresi dışındaki adreslere verilmez ve gönderilmez. Bu bilgilerin güncel tutulması katılımcı laboratuvarın sorumluluğundadır.

8- Testler:**HORMON (H-26) SONUÇ KAYIT LİSTESİ**

TEST PARAMETRESİ	BİRİMİ	SONUÇ	
		H-26-...-01	H-26-...-02
17-OH progesteron	nmol/L ng/mL x 3.03 = nmol/L		
25-OH vitamin D (Total)	µg/L 1ng/mL=1µg/L		
Estradiol	ng/L 1 pg/mL = 1 ng/L		
FSH	IU/L 1 mIU/mL = 1 IU/L		
FT3	ng/L 1 pg/mL = 1 ng/L 1 pmol/L x 0.65 = ng/L		
FT4	ng/dL pmol/L x 0.078 = ng/dL		
hCG	IU/L 1 mIU/mL = 1 IU/L		
İnsülin	mU/L 1 µIU/mL = 1 mU/L		
Kortizol	µg/dL		
LH	IU/L 1 mIU/mL = 1 IU/L		
Progesteron	µg/L 1 ng/mL = 1 µg/L		
Prolaktin	µg/L 1 ng/mL = 1 µg/L		
T3	ng/mL		
T4	µg/dL		
Testosteron (Total)	ng/dL ng/mL x 100 = ng/dL		
TSH	mIU/L 1 µIU/mL = 1 mIU/L		

Web sayfası üzerinden veri girişinde sistem virgülden sonra 2 rakam girişine izin vermektedir. Bu form, internetten veri girişi sırasında size kolaylık sağlaması için düzenlenmiştir.

Lütfen bu formu muhafaza ediniz. Bize geri fakslamayınız, göndermeyiniz.

9- Çalışma Takvimi:

Bir yıl 4 dönemden oluşmaktadır. Mart, Mayıs, Eylül, Kasım aylarını kapsayan dönemlerde 2 seviye numune gönderimi yapılmaktadır. Gönderilen numuneler ilgili olduğu dönemi belirtecek şekilde numaralandırılmıştır.

2026 Labpt Dış Kalite Kontrol Hormon Çalışma Takvimi				
Çalışma Ayları	Numune Dönem Kodu	Gönderim Tarihi	Önerilen Çalışma Tarih Aralığı	Sonuç Giriş Son Tarihi
Mart	H-26-03	02-03 Mart 2026	03-04 Mart 2026	09 Mart 2026
Mayıs	H-26-05	04-05 Mayıs 2026	05-06 Mayıs 2026	11 Mayıs 2026
Eylül	H-26-09	07-08 Eylül 2026	08-09 Eylül 2026	14 Eylül 2026
Kasım	H-26-11	09-10 Kasım 2026	10-11 Kasım 2026	16 Kasım 2026

Önemli: Son sonuç giriş tarihinin kaçırılması durumunda sonuç girişi yapılamamaktadır. Lütfen KIRMIZI ile yazan tarihleri not ediniz veya bu dokümanın Çalışma Takvimi bilgilerini içeren sayfasının çıktısını alarak kolay erişebileceğiniz bir alanda bulundurunuz.

- Sonuç girişi için son tarihin kaçırılması durumunda “Geç rapor” uygulamamız bulunmamaktadır.
- Numune gönderiminin yapıldığı gün SMS ve e-posta ile bilgilendirme yapılır. Sistemimizde iletişim bilgilerinizin güncel tutulmasını önemle rica ederiz.
- Numunelerin gönderim tarihinden sonra (en geç 72 saat) elinize ulaşmaması durumunda kurumumuzla iletişime geçmeniz halinde yeni numune gönderimi yapılır.

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI
HORMON PROGRAMI
NUMUNE SAKLAMA ve ÇALIŞMA TALİMATI

10- Test Metotları:

TEST ADI	METODLAR
TSH	Diğer Yöntemler CLIA CMIA ELFA ECLIA
FT4	Diğer Yöntemler CLIA CMIA ELFA ECLIA
HCG	Diğer Yöntemler CLIA CMIA ELFA ECLIA
FT3	Diğer Yöntemler CLIA CMIA ELFA ECLIA
T3	Diğer Yöntemler CLIA CMIA ELFA ECLIA
T4	Diğer Yöntemler CLIA CMIA ELFA ECLIA
LH	Diğer Yöntemler CLIA CMIA ELFA ECLIA
FSH	Diğer Yöntemler CLIA CMIA ELFA ECLIA
TESTOSTERON(TOTAL)	Diğer Yöntemler CLIA CMIA ELFA ECLIA
ESTRADIOL	Diğer Yöntemler CLIA CMIA ELFA ECLIA

TEST ADI	METODLAR
PROGESTERON	Diğer Yöntemler CLIA CMIA ELFA ECLIA
PROLAKTİN	Diğer Yöntemler CLIA CMIA ELFA ECLIA
17-OH PROGESTERON	Diğer Yöntemler ELISA GC-MS LC-MS/MS CLIA RIA
KORTİZOL	Diğer Yöntemler CLIA CMIA ELFA ECLIA
İNSÜLİN	Diğer Yöntemler CLIA CMIA ECLIA
VİTAMİN D	Diğer Yöntemler ELISA CLIA CMIA ELFA ECLIA HPLC LC-MS/MS RIA

Dokümanın güncellenme tarihi: 22-01-2026